


Amsler-Gitter Test zur frühzeitigen Erkennung der Altersbezogenen Makuladegeneration

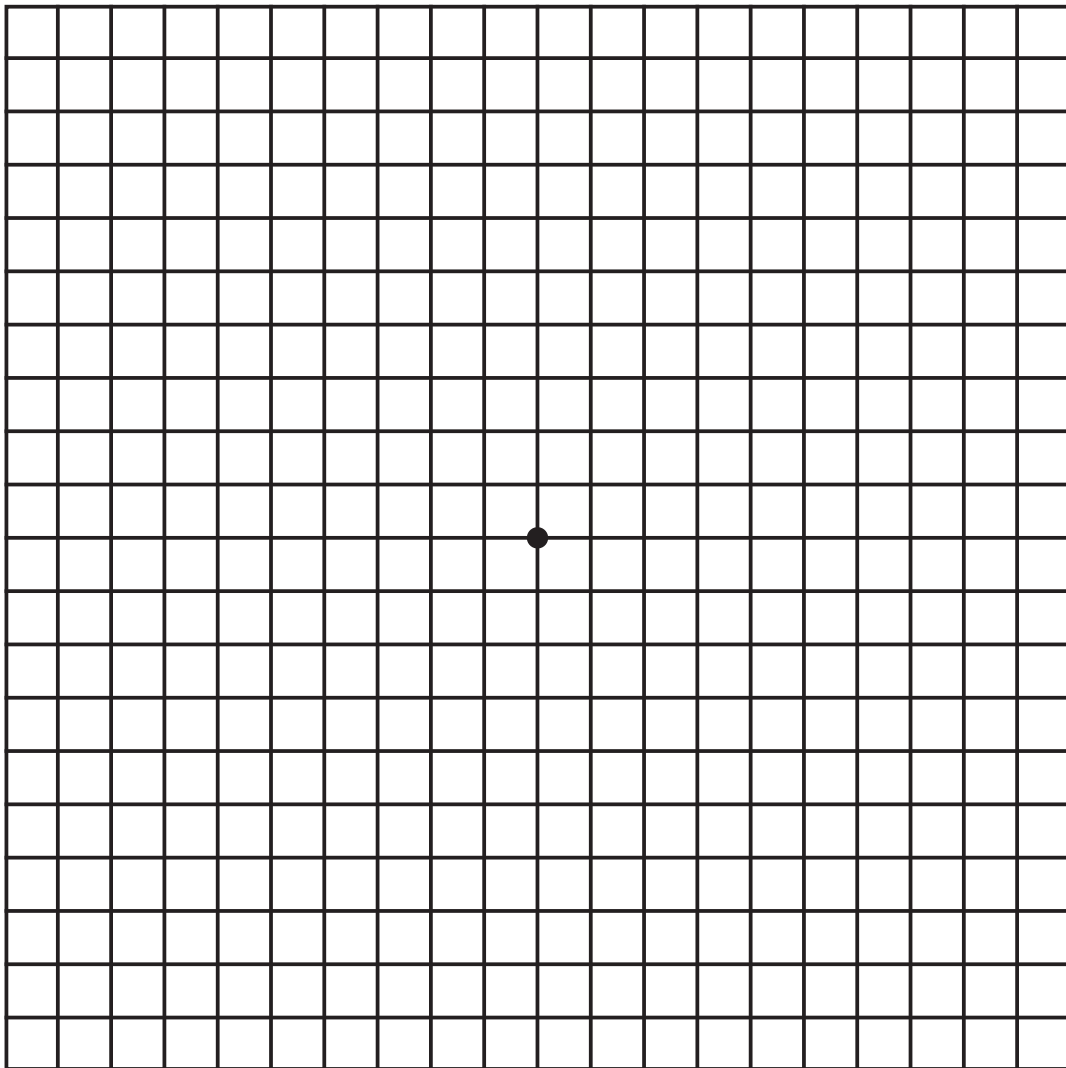

Anleitung zur Anwendung des Amsler-Gitters

Sie können den Test mit jedem Patienten einfach, an jedem Ort und zu jeder Zeit durchführen:

-
1. Falls Ihr Patient beim Lesen eine Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen) verwendet, dann sollten er diese auch beim Test tragen.



-
2. Lassen Sie den Patienten ein Auge mit der hohlen Hand abdecken.



-
3. Platzieren Sie das Amsler-Gitter bei heller Beleuchtung in bequemer Lesedistanz (30 - 40 cm) vor Ihren Patienten.

-
4. Weisen Sie den Patienten an, mit dem anderen Auge den schwarzen Punkt in der Mitte des Gitters zu fixieren.

-
5. Fragen Sie Ihren Patienten, ohne dass er die Fixation des Punktes aufgibt, wie der Rest des Gitters aussieht.

-
6. Der Patient sollte es vermeiden, den Blick über das Gitter wandern zu lassen.

-
7. Bitten Sie den Patienten, den Test mit dem anderen Auge zu wiederholen.



-
8. Testergebnis:
- a. Sind leere, verzerrte, verschwommene Stellen oder gewellte Linien sichtbar?
 - b. Haben nicht alle Quadrate dieselbe Grösse oder scheinen Quadrate zu fehlen?
 - c. Sind nicht alle 4 Ecken des Amsler-Gitters sichtbar?

Falls Sie Unregelmässigkeiten vorfinden, unternehmen Sie bitte die notwendigen Schritte.

Unter dem Patronat der



Retina Suisse



Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern. www.novartispharma.ch